

Hylo Lasop Kullanım Bilgileri

HYLO-LASOP® 10 mL Göz Damlası

Sodyum Hiyalüronat 1 mg/mL

Oftalmik cerrahi müdahaleler kapsamında göz yüzeyinin nemlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Gözde kullanmak üzere fosfat içermeyen 10 mL steril solüsyon

HYLO-LASOP® Nedir?

HYLO-LASOP®, 1 mg/mL sodyum hiyalüronat, sorbitol, sitrat tampon solüsyonu ve su ihtiva eden, fosfat ve koruyucu madde içermeyen steril bir solüsyondur.

HYLO-LASOP® Ne İçin Kullanılır?

Oftalmik cerrahi müdahaleler kapsamında göz yüzeyinin nemlendirilmesi amacıyla kullanılır.

HYLO-LASOP® Ne Zaman Kullanılmalıdır?

HYLO-LASOP® hiyalüronik asidinin sodyum tuzunu içermektedir. Bu madde hem gözde hem de vücudun başka bölümlerinde bulunan doğal bir maddedir. Özel fiziksel karakteristiği sayesinde göz yüzeyinde eşit, stabil ve uzun ömürlü nemlendirici bir film tabakası oluşturur. Biyoadheziv özelliği ile kornea tabakası ve konjunktivayı korur. Doğal gözyaşı ile beraber göz yüzeyinde kayganlığı artırarak göz kapağının hareketini kolaylaştırır. Oluşturduğu uzun ömürlü nemlendirici film tabakasıyla gözü irritasyondan korur.

Gözde yapılan cerrahi müdahaleler veya gözde meydana gelen yaralanmalar sonrası doğal göz yaşı salgısı azalır. Ancak bu durumlarda, dokuların rejenerasyonu için göz yüzeyinin sürekli yeterli derecede nemlendirilmesi gereklidir. HYLO-LASOP® kullanımı ile kornea tabakası ve konjunktiva uzun süre nemli tutulabilir ve böylece iyileşme sürecinin en iyi şekilde devam etmesi sağlanır.

HYLO-LASOP® koruyucu madde içermediği için genel olarak çok iyi bir şekilde tolere edilir. Ek olarak, HYLO-LASOP® fosfat içermediğinden dolayı, kornea içinde çözülmez birikinti oluşumu ve buna bağlı olası komplikasyonlar görülmez.

HYLO-LASOP® Nasıl Kullanılır?

Kullanmadan önce şişenin kapağını çıkartınız.

HYLO-LASOP® 'u ilk kullanırken şişesini damlatma ucu aşağıya gelecek şekilde ters çeviriniz ve şişe tabanına şişenin ucundan ilk damla çıkıncaya kadar bastırınız. Artık şişe kullanıma hazırdır. Şişeyi ucu aşağıya gelecek şekilde tutunuz ve şişe tabanına hızlı ve kuvvetlice bastırınız. Böylelikle mekanizma, bir tane damlanın çıkarılması için kullanılmış olur. Özel COMOD valf sistemi sayesinde, ne kadar güç uygulanmış olursa olsun çıkan damlaların büyüklüğü ve hızı aynı olacaktır.

Başınızı hafifçe geriye yatırınız, alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekiniz ve tarif edildiği gibi bir damlayı alt konjonktivanın içine damlatınız. Sıvının göz yüzeyinde eşit şekilde dağılabilmesi için gözlerinizi yavaşça kapatınız.

Kullandıktan sonra şişenin kapağını derhal kapatınız. Lütfen damlatma ucunun kuru olduğuna dikkat ediniz. Damlatma esnasında göz veya yüzün, damlatma ucuyla temasından kaçınınız.

COMOD® sistemi 10 mL göz damlası içerir. Bu yaklaşık 300 damlaya eşittir. Teknik sebeplerden ötürü kullanım sonunda şişenin içerisinde geride az bir miktar sıvı kalabilir.

HYLO-LASOP® 'u kullanma süresi için herhangi bir sınır yoktur.

Her bir HYLO-LASOP® şişesi, sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

Başka Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?

HYLO-LASOP® ile beraber başka göz damlaları da kullanılıyorsa, uygulamalar arasında en az 30 dakika süre olmasına ve en son HYLO-LASOP® kullanılmasına dikkat ediniz. Göz merhemleri ise, mutlaka HYLO-LASOP® 'dan sonra uygulanmalıdır.

Fosfat ve koruyucu madde içermediğinden dolayı HYLO-LASOP[®], uzun süreli kullanımda bile çok iyi tolere edilir. Çok nadir olarak yanma, göz sulanması gibi hipersensitivite reaksiyonları görülmüş, ancak HYLO-LASOP[®]'un kullanılmasının durdurulmasıyla bunlar derhal ortadan kalkmıştır.

Hangi Sıklık ve Ne Kadar Süreyle HYLO-LASOP[®] Damlatmalıdır?

HYLO-LASOP[®] göz doktorunuzun ya da kontak lens uzmanınızın öneri ve talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır.

Genel olarak HYLO-LASOP[®] günde üç kez her iki göze birer damla şeklinde uygulanır. Gerekli görülürse daha sık da damlatılabilir. Eğer daha sık HYLO-LASOP[®] kullanmanız gerekirse (örneğin günde 10 defadan fazla), lütfen kullanmadan önce bir göz doktoruna danışınız. HYLO-LASOP[®] uzun süreli kullanım için uygundur. Ancak - her hastalık durumunda olduğu gibi - uzun süre geçmeyen şikayetlerde göz doktoruna danışılmalıdır.

HYLO-LASOP[®] u Ne Zaman Kullanmamalıdır?

İçerdiği bileşenlerden birine karşı aşırı hassasiyetin bilinmesi durumunda HYLO-LASOP[®] kullanılmamalıdır.

HYLO-LASOP[®] Muhafaza Ederken Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?

HYLO-LASOP[®] 25^o C'yi geçmeyen oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Şişe açıldıktan sonra kullanım süresi 12 haftadır.

HYLO-LASOP[®] son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
HYLO-LASOP[®] 'u çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

En son güncelleme: Mart 2006

Üretici: URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG
Industriestraße 35 D-66129 Saarbrücken
Tel: 06805/9292-0
Faks: 06805/9292-88
e-mail: info@ursapharm.de, www.usrapharm.de

CE₀₁₉₇

STERILE	A
---------	---

SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR!

Sizin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
HYLO-LASOP®'un ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilmesi için lütfen bize yazınız!

Doldurduğunuz anketi lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:

Biem Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Denizciler Cad. No:7,
06240, Ulus / ANKARA

veya 0 312 310 52 86 no'lu faksa ya da biemilac@biemilac.com.tr adresine gönderiniz.

1. HYLO-LASOP® göz damlasını ne zaman kullandınız?

- Gözlerin Nemlendirilmesinde?
 Cerrahi müdahaleden sonra gözlerin nemlendirilmeleri için?
 Diğer: _____

2. HYLO-LASOP® göz damlasını hakkındadeğerlendirmeniz nedir?

Gözlerin nemlendirilmesinde

- çok iyi iyi kısmen iyi kötü çok kötü

Etki süresine göre

- çok iyi iyi kısmen iyi kötü çok kötü

Uygunluğu açısından

- çok iyi iyi kısmen iyi kötü çok kötü

3. Bilgilerimin URSAPHARM da kaydedileceğini kabul ediyorum. Bu bilgiler üçüncü şahıslara ulaştırılmayacaktır!

Adı _____ Soyadı _____
Cadde/Sok No. _____ P.Kodu, il _____
Yaş* _____ Meslek* _____
Tarih _____ İmza _____

*bu bilgiyi vermede serbestsiniz